

NÁVOD K POUŽITÍ

URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ LÉKAŘSKÉ POUŽITÍ

Popis

Elektrodový Gel Spectra 360 je nesterilní, elektricky vodivý gel bez obsahu solí. Je nedráždivý, hypoalergenní a bakteriostatický. Jeho hladká konzistence umožňuje dlouhodobé použití bez potřeby opětovného nanášení. Spectra 360 je gel bez obsahu soli, což ho činí zvláště vhodným pro dlouhodobé aplikace. Spectra 360 pracuje tak, že navlhčí pokožku, čímž snižuje elektrický odpor kůže.

Indikace pro použití

Spectra 360 se doporučuje pro všechny elektroléčebné postupy (s výjimkou defibrilace), včetně EKG, TENS, monitorování a může být použit i u pediatrických pacientů.

Kontraindikace

- Spectra 360 není indikován pro defibrilační postupy.

Varování

- Nepoužívat u pacientů se známou citlivostí na parabeny.

Opatření

- Pouze pro vnější použití na neporušenou, intaktní pokožku.
- Výrobek zlikvidujte, pokud je obal poškozen nebo pokud máte podezření o kontaminaci.
- Aby se zabránilo kontaminaci, aplikační koncovka obalu by se neměla dostat do kontaktu s pacientem, personálem nebo nástroji.

Podmínky použití

Viz návod k použití dodaný výrobcem elektrod, jednotkou TENS nebo jiným zařízením definujícím informace o tom, jak má být Spectra 360 používán s jejich výrobkem. Gel Spectra 360 je rozpustný ve vodě a lze jej odstranit navlhčeným měkkým hadříkem.

Zacházení

Není vyžadováno žádné speciální zacházení. Spectra 360 je nehořlavý a nekorozivní.

Podmínky skladování

Skladujte při pokojové teplotě. Chraňte výrobek před přímým slunečním zářením.

Likvidace

Řiďte se všemi státními a místními předpisy pro likvidaci odpadu, který není nebezpečný.

Distributor

KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o.

Božkovská 646/38

326 00 PLZEŇ - Slovany

Tel.: 377 424 999

Web: SZO.cz

E-mail: krasny@szo.cz