

# Defi<sup>®</sup> 5S

Pokročilý automatizovaný externí defibrilátor



Lead  
the way to  
save a life

• Pokročilá technologie



## Výhody

2 jazyky na výběr

5 úrovní hlasitosti zvuku

Tlačítko režimu pro dospělé/děti

Infračervený port pro přenos dat

Denní, týdenní a měsíční autotest

Použití AED v tašce

## Snadné použití

### ■ Spusťte zařízení

Zapněte napájení.

Okamžitě se spustí hlasový pokyn, který vás provede ovládáním AED.



STEP 1

### ■ Připevněte podložky k pacientovi

Po připojení elektrod začne AED okamžitě analyzovat EKG. Zařízení přejde k dalšímu kroku až poté, co dobře připevníte podložky.



STEP 2

### ■ Vyberte energii

Mezinárodní resuscitační směrnice doporučuje snížit energii dětského pacienta, aby se zabránilo pálení srdečního svalu. Řada Meditech Defi SS dokáže snížit energii na 30/70 J pouhým výběrem energetického rozsahu



STEP 3

### ■ Stiskněte tlačítko

Pokud je potřeba výboj, tlačítko výboje bliká. Stisknutím tlačítka vyšlete pacientovi elektrický výboj



STEP 4



# Technické specifikace

# Defi<sup>®</sup> 5S

Průběh vlny	Dvoufázová zkrácená exponenciála
Autotest	Denně, týdně, měsíčně
Režim	Dospělý, dítě
Energie	200 joulů max
Energetická sekvence	Dětský režim: 50/50/75 joulů Režim pro dospělé: 150/150/200 joulů
Doba nabíjení (Nové, při 25°C)	Méně než 6 sekund, až 150 J Méně než 8 sekund, až 200 J
Hlasová výzva	Rozsáhlá hlasová výzva
Ovládání vizuálních indikátorů	LED výzvy
Řízení	Tři tlačítka: ON/OFF Výběr režimu. Šok
Ukládání EKG	1500 událostí. (4 hodiny)
Přenos dat	Infračerveně

Napájení	Typ
Rozměry	Hmotnost(S baterií)
	Provozní teplota
	Provozní vlhkost
	Skladovací teplota (Bez baterie)
	Skladovací vlhkost (Bez baterie)
	Skladovací teplota (Pro podložky)

Baterie není nabíjecí	12 V, 2800 mAh Li-MnO2
Hloubka (H)	: 80mm
Šířka (Š)	: 240mm
Délka (D)	: 300mm
	1,9 kg (4,2 liber)
	0 °C až 40 °C
	Relativní vlhkost mezi 30% a 95% (bez kondenzace)
	-20 °C až 55 °C
	Až 93 % (bez kondenzace)
	0 -50 °C



## Příslušenství

### ■ Pouzdro na přenášení



Reflexní pásek



Měkká rukojeť



Ochrana reproduktorů

Průhledný panel

Zásuvkový chránič

### ■ Baterie

CR123A – 4x2,8 Ah 12 V nedobíjecí baterie

### ■ Jednorázová podložka

Navrženo pro použití externí defibrilace, neinvazivní stimulace, synchronizované kardioverze a monitorování u dospělých a dětí vážících více než 20 kg (55 liber)



**MEDITECH<sup>®</sup>**

Meditech Equipment Co.,Ltd  
Address:140Zhuzhou Rd.Qingdao.  
Shandong Province.P.R.China.266101.

Tel:+86 (0532)85832673  
Fax:+86 (0532)81700533

Email:sales@meditech.cn  
www.meditech.com.cn

**CE** 0482

