



Čtečka FreeStyle Libre 2

Čtečka FreeStyle Libre 2 odečítá a shromažďuje data o koncentraci glukózy ze senzorů FreeStyle Libre 2. Čtečka ukazuje aktuální hladinu glukózy při skenu a za posledních 8 hodin. Šipka a její směřování znázorňují vývoj koncentrace glukózy. Do její paměti se vejde 90 denní historie měření. Čtečka také umožňuje využití volitelných alarmů.

Jak funguje

1. APLIKUJTE SENZOR

Senzor FreeStyle Libre 2 se aplikuje na zadní stranu horní části paže jednorázovým aplikátorem, který je součástí balení. Během aplikace senzoru dochází k zavedení tenkého, ohebného vlákna do podkoží. Na paži pak senzor drží díky malé přilnavé náplastí.

2. NASKENUJTE SENZOR

Pro získání hodnot koncentrace glukózy stačí krátký 1sekundový sken senzoru čtečkou ze vzdálenosti do 4 cm. Tento sken vám ukáže více informací než měření glykémie pomocí glukometru a testovacích proužků, bez nutnosti píchání do prstu. Systém FreeStyle Libre 2 též nabízí zabezpečené cloudové úložiště LibreView, který vám umožňuje generovat řadu přehledových reportů, jež vám a vašemu lékaři pomohou s analýzou naměřených hodnot koncentrace glukózy.

3. ZÍSKÁVEJTE HODNOTY

Každý sken senzoru čtečkou vám ukáže aktuální hladinu koncentrace glukózy, její průběh za posledních 8 hodin, trend ve formě šipky, která ukazuje, jakým směrem se hodnota koncentrace glukózy pohybuje. Čtečkou můžete skenovat i skrze oblečení.