

BACTINYL DESINFEKČNÍ VLHČENÉ UBROUSKY BEZ VŮNĚ



VÝHODY

- Bez nebezpečí pro všechny povrchy, dokonce i ty nejkřehčí
- Baktericidní, kvasinkocidní a virucidní účinnost
- Kontakt s potravinami



Jemná formule

CE
1014

ZDRAVOTNICKÉ
PROSTŘEDKY



DESINFEKČNÍ PROSTŘEDEK



APLIKACE

Vlhčené ubrousky na jedno použití naimpregnované desinfekčním roztokem pro kontaktní čištění a desinfekci neinvazivních zdravotnických prostředků, přístrojů, zdravotnického materiálu a vybavení. Zdravotnický prostředek. TŘÍDA IIA.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Otřete plochu pomocí BACTINYL DESINFEKČNÍCH VLHČENÝCH UBROUSKŮ BEZ VŮNĚ. Respektujte dobu účinku po otření ubrouskem vzhledem k požadované účinnosti. Nechte uschnout. Neoplachujte, kromě případu, kdy se plochy mohou dostat do kontaktu s potravinami. Po použití dobře uzavřete víčko, aby míra impregnace zůstala optimální až do použití posledního ubrousku. Nenahrazuje desinfekci namáčením. V souladu s nařízením ze dne 19/12/13 pozměňujícím nařízení ze dne 08/09/99, týkajícím se prostředků pro čištění materiálů a předmětů určených pro příchod do kontaktu s potravinami.

FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI IMPREGNAČNÍ TEKUTINY

Vzhled:	tekutina
Barva:	bezbarvá
Vůně:	bez vůně
Hustota:	= 1
pH prostředku:	slabá zásada
Trvanlivost:	2 roky
Skladování:	4°C – 35°C



MIKROBIOLOGICKÉ VLASTNOSTI IMPREGNAČNÍ TEKUTINY

Baktericidní účinnost: EN 13727 (podmínky špíny - 1 min – 20°C), EN 14561 (podmínky špíny – 5 min – 20°C), EN 16615 (podmínky špíny – 2 min +/- 15 sekund – 20°C)

Kvasinkocidní účinnost: EN 13624 (podmínky špíny – 1 min – 20°C), EN 14562 (podmínky špíny – 15 min – 20°C), EN 16615 (podmínky špíny – 2 min +/- 15 sekund – 20°C)

Sporicidní účinnost: EN 13704 na *Bacillus Subtilis* a *Clostridium difficile* (podmínky čistoty – 60 min – 20°C)

Virucidní účinnost: EN 14476 na PRV*, BVDV*, H1N1, Herpes, Vaccinia virus, Rotavirus (podmínky špíny – 5 min – 20°C), Norovirus (podmínky špíny – 15 min – 20°C), HIV (podmínky špíny – 60 sek – 20°C)

* Swine Pseudorabies Virus (PRV) a Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) jsou substituty pro HBV a HCV.

BALENÍ

Krabička 120 vlhčených ubrousků	Réf. LB920630
Krabička 120 vlhčených ubrousků	Réf. LB920710B
Kbelík 300 vlhčených ubrousků	Réf. LB920620

BEZPEČNOST

Prostředek určený výhradně k profesionálnímu použití. Pro více informací konzultujte bezpečnostní list.

DISTRIBUTOR PRO ČESKOU REPUBLIKU
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o.
Božkovská 38, 326 00 PLZEŇ

Telefon: 377 424 999 *www.szo.cz

