

NALEPOVACÍ EKG ELEKTRODA



• Oholení



• Příprava




• Připojení



• Sloupnutí



• Přiložení

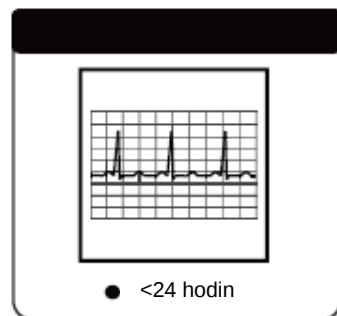

POZOR



TEPLOTNÍ LIMITY



**CHRAŇTE PŘED PŘÍMÝM
SLUNEČNÍM SVĚTLEM**



CHRAŇTE PŘED VLHKEM



KÓD ŠARŽE



MNOŽSTVÍ



DATUM POUŽITELNOSTI



**NEPOUŽÍVEJTE, POKUD JE
POŠKOZENÝ OBAL**



ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK



NESTERILNÍ



VÝROBCE



BEZ OBSAHU LATEXU



BEZ OBSAHU PHT



PŘEČTĚTE SI NÁVOD



REFERENCE



**SOULAD SE SMĚRNICÍ
MDR2017/745**

NÁVOD K POUŽITÍ

Určené použití:

Použití pro monitoring EKG nebo provádění diagnózy s připojeným zařízením, jako jsou zdravotnické senzory.

Pokyny k použití:

1. Zajistěte, aby kůže byla suchá, čistá a zbavená nadbytečného ochlupení.
2. Připojte svod k elektrodě.
3. Zvednutím za okraj sejměte elektrodu z podkladu.
4. Umístěte elektrodu na kůži. Pevně přitiskněte střed a vnější okraj pro lepší adhezi.
5. Zahajte postup EKG.

Upozornění:

1. Sáček otevřete až bezprostředně před použitím a nepoužité elektrody uchovávejte v původním obalu.
2. Pouze pro použití personálem ve zdravotnických zařízeních.
3. Jednorázový prostředek, který není určen k opakovanému použití. Při opakovaném použití nemusí být přilnavost a elektrické vlastnosti dostačující. Kromě toho existuje riziko přenosu infekce z pacienta na další osoby.
4. Nedoporučuje se používat elektrodu po dobu delší než 72 hodin.
5. Elektrody neumísťujte na bradavky, zvrásnělou kůži, vystupující kosti, poraněnou, podrážděnou nebo jinak poškozenou kůži.
6. Elektrodu nepoužívejte, pokud je gel zaschlý.
7. EKG elektrody je nutno po použití řádně zlikvidovat.
8. Při použití elektrody může dojít k drobnějšímu podráždění kůže. Pokud se tak stane, obraťte se na svého předepisujícího lékaře nebo odborné zdravotnické pracovníky.
9. Při nesprávném odstraňování mohou EKG elektrody způsobit poranění kůže.

Skladování:

Teplota prostředí: -10 až 40 °C (14-104 °F)

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Během chirurgických operací je nutno elektrody umístit co nejdále od místa použití elektrochirurgických nástrojů za účelem snížení nežádoucího RF rušení na minimum.
2. V případě výskytu nežádoucích událostí je uživatel povinen tuto událost nahlásit výrobci a příslušným úřadům své země.