

RESPimer enfant

UCPANÝ NOS
Rýma, rinofaryngitida.



RESPIMER® enfant je indikován při léčbě rinitidy, rýmy a zánětu nosohltanu při ucpaném nosu, rýmě a kýchání.

RESPIMER® enfant je dekongestant, kombinující 100 % přírodní, neředěnou hypertonickou mořskou vodu, bohatou na minerály a stopové prvky se 3 esenciálními oleji (Ravintsara, Linalool tymián a Máta polní).

Nemedikamentózní formule (bez vazokonstriktorů a kortikoidů) a bez konzervačních látek, **RESPIMER® enfant** je formule bez rebound efektu, respektující nosní sliznici. Bez vysoušecího efektu.

- Nevysušuje nosní sliznici
- Nezpůsobuje závislost a nezpůsobuje rebound efekt
- Neobsahuje konzervační látky

Kontraindikace:

RESPIMER® enfant nesmí být používán:

- v těhotenství a při kojení
- u dětí do 3 let věku
- jestliže máte alergii na kteroukoliv složku přípravku
- jestliže máte astma.

PROČ POUŽÍVAT RESPIMER® ENFANT ?

RESPIMER® enfant má složení s trojitým účinkem pro rychlou a trvalou úlevu:

1. Dekongesční účinek

Vysoká koncentrace minerálních solí v RESPIMER® enfant umožňuje mechanický dekongesční účinek, nazývaný "osmotický efekt".

2. Fluidizační účinek

Hypertonický roztok mořské vody ředí hlen, což napomáhá jeho vyplavování. Jakmile se hlen uvolní, rýma a ucpaný nos se uvolní.

3. Čistící účinek*

RESPIMER® enfant napomáhá vyloučení virů a bakterií drenážním efektem*: vylučování přebytku hlenu a tím i zachycených patogenů je usnadněna jejich fluidizací.

Účinnost a tolerance přípravku RESPIMER® enfant jsou klinicky prokázány⁽¹⁾.

RESPIMER® enfant také snižuje dýchací potíže, zlepšuje kvalitu spánku a zároveň snižuje únavu⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Odkaz na studii RHINO – Studie zahrnující 553 dospělých trpících akutní rinitidou.

CO OBSAHUJE FORMULE RESPIMER® ENFANT ?

SLOŽENÍ: 95 % Maris aqua, Xylitol, Alkohol, Myristamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate and Aqua, Olej z listů Mentha Arvensis, Olej z listů Cinnamomum Camphora, Olej z Thymus Vulgaris (květ/list).

Nemedikamentózní formule. Bez vazokonstriktorů a bez kortikoidů. Bez konzervantů. Bez rebound efektů. Formule dobře snášena.

JAKÉ INFORMACE POTŘEBUJÍ VĚDĚT PŘED POUŽITÍM

RESPIMER® ENFANT?

- Může být užíván pro děti od 3 let věku.
- Neobsahuje vazokonstriktory ani kortikoidy

JAK POUŽÍVAT RESPIMER® ENFANT ?

DAVKOVÁNÍ

Děti od 3 do 15 let: 1 vstřík do každé nosní dírky až 4 krát denně.

REŽIM PODÁVÁNÍ

Při používání u dětí se doporučuje dohled dospělé osoby.

Od 3 do 6 let musí zařízení používat dospělá osoba.

1. Vysmrkejte se.
2. Odstraňte ochranný kryt.
3. Před prvním použitím několikrát silně stlačte aktivátor, dokud roztok nezačne vytékat.
4. Se vzpřímenou hlavou stříkněte do každé nosní dírky, lehce dýchejte nosem.
5. Před smrkáním nechte roztok několik minut působit.

Po každém použití očistěte stříkací aktivátor a nasadte ochranný kryt.

Uchovávejte v původním obalu.

Používejte jedno zařízení na osobu, abyste zabránili šíření infekce.

Při citlivosti nebo podráždění nosu se může objevit dočasné svědění.

JAK SKLADOVAT RESPIMER® ENFANT

Spotřebujte do 6 měsíců od prvního použití.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte, pokud je výrobek poškozen.

Pokud nosní příznaky přetrvávají déle než 7 dní, poraďte se s lékařem.

Jakýkoliv vážný incident, který se vyskytne v souvislosti s tímto produktem, musí být nahlášen výrobcí Laboratoire de la Mer a prostřednictvím národního systému hlášení: Národní agentura pro bezpečnost léčiv a zdravotnických výrobků (ANSM) a síť regionálních center Pharmacovigilance – webové stránky: www.signalement-sante.gouv.fr.

Vyrobeno ve Francii – PATENTOVANÁ FORMULE – Zdravotnický prostředek – Nosní sprej

•J Laboratoire de la Mer
Avenue du Général Patton ZAC de la Madeleine 35400 Saint-Malo-FRANCE

Distributor :
Laboratoires Oméga Pharma France
20, rue André Glide 92320 Châtillon-FRANCE

[Lr25°C



Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé!



PAP
Papier recyclable



PAP
Carton recyclable



Datum prvního označení CE: 2014-02
Datum revize zprávy V1: 2022-02

20 mie CN0T1395 LF30507A