


Silikonová polštářová maska Besmed

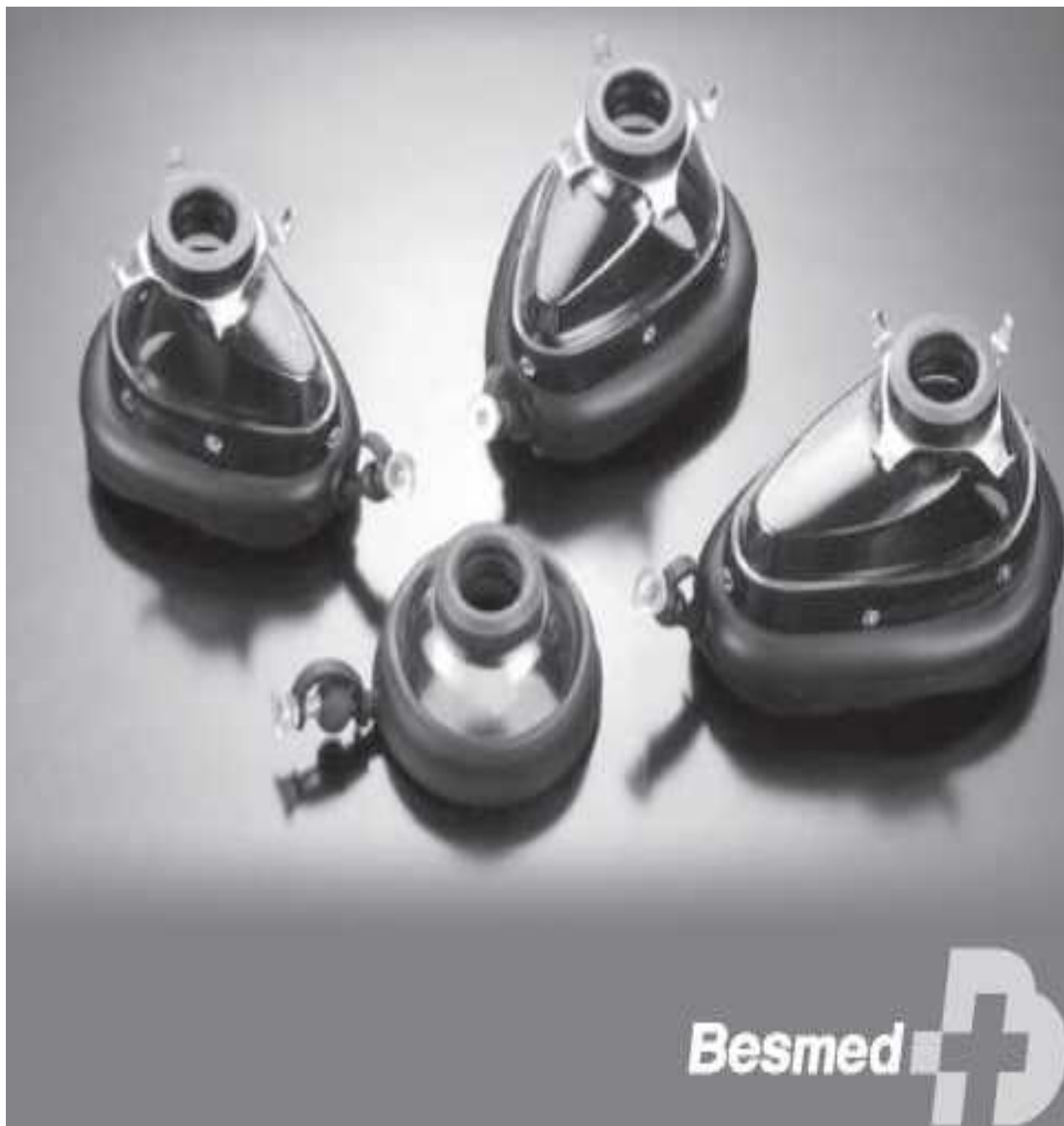

Návod k použití

Silikonová polštářová maska Beamed s nafukovací manžetou

1. Upozornění

Federální zákon USA omezuje prodej tohoto zařízení na lékaře nebo na jeho předpis (pouze v USA). Pouze pro použití personálem vyškoleným pro KPR. Je třeba natrénovat zejména správné nasazení obličejové masky k dosažení dokonalého utěsnění. Ujistěte se, že je personál seznámen s obsahem této příručky.


2. Popis

Silikonová polštářová maska Besmed je určena k použití s manuálními resuscitátory, automatickými resuscitátory a ventilátory.

Velikosti 2, 3, 4, 5 a 6 s ISO konektorem 22 mm. Lze je opakovaně autoklávovat při teplotě 134 stupňů Celsia.

Průhledná kupole umožňuje sledovat stav pacienta. Nafouknutí měkké manžety lze nastavit.

■ SILIKONOVÁ POLŠTÁŘOVÁ MASKA

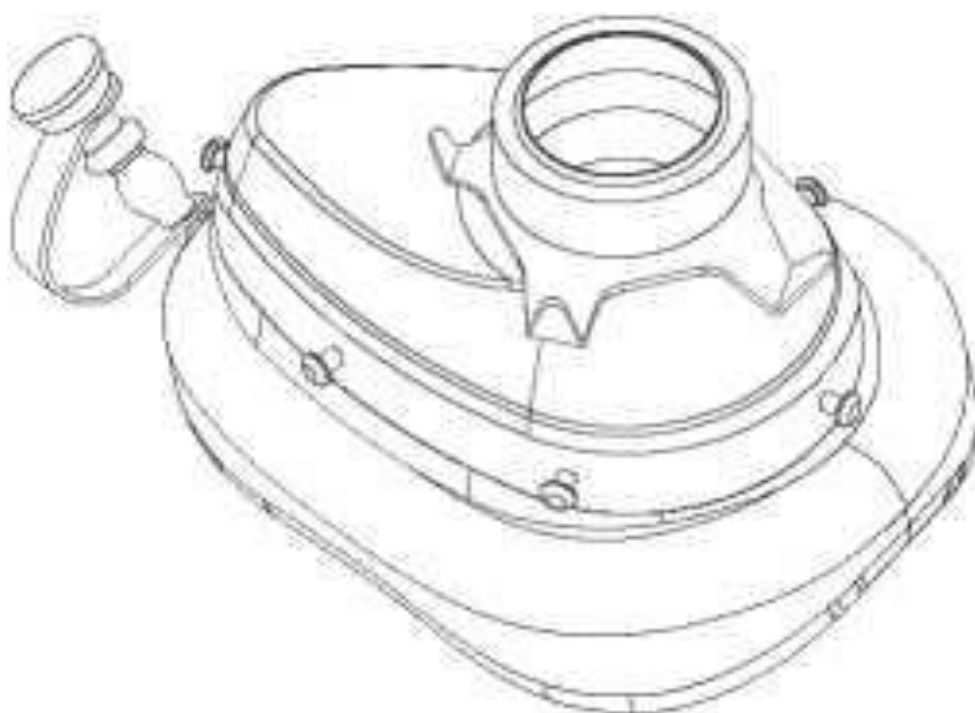

3. Návod k obsluze:

Ventilace pomocí polštářové masky. Pevně přiložte masku na obličej pacienta, aby bylo dosaženo dokonalého utěsnění. Držte masku pevně na obličeji a zároveň udržujte správný sklon hlavy, aby dýchací cesty zůstaly volné.

4. Čištění, dezinfekce, sterilizace

Metoda			Použitelnost
Čištění	Mytí	Ruční mytí	✓
		Mytí v myčce	✓
	Dezinfekce	Teplem	✓
		Varem	✓
		Chemická	✓
	Autoklávování	121 °C	✓
		134 °C	✓

Tabulka ukazuje příslušné metody čištění, dezinfekce a sterilizace masky po každém použití.

Detergenty a chemické dezinfekční prostředky


K dispozici je mnoho značek čisticích prostředků a chemických dezinfekčních prostředků. Abyste zabránili zkrácení životnosti materiálů, používejte pouze značky, které jsou kompatibilní s materiály masky.

Poznámka: Pokud se zbytky čisticích nebo dezinfekčních prostředků nechají zaschnout na materiálu masky, mohou poškodit povrch a zkrátit životnost výrobku.

4.1 Demontáž masky (doporučeno)

Odepněte nebo sejměte manžetu z kupole masky.

Pozor! Před autoklávováním odstraňte zátku z nafukovací trubice.

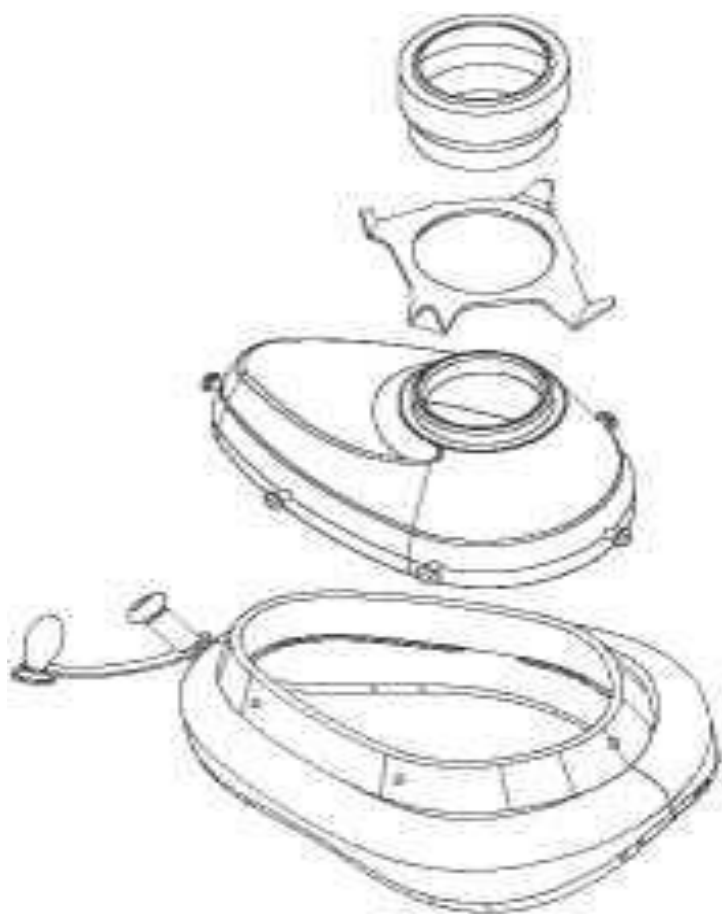

4.2 Čištění částí masky

Ruční mytí nebo mytí v automatické myčce

Části masky omyjte v teplé vodě s použitím čisticího prostředku vhodného pro materiály masky. Všechny části důkladně opláchněte v čisté vodě, abyste odstranili všechny zbytky čisticího prostředku.

Pokud se provádí povrchové čištění a/nebo dezinfekce vnějších povrchů masky, ujistěte se, že je čisticí a/nebo dezinfekční prostředek kompatibilní s materiály masky, a nezapomeňte čisticí/dezinfekční prostředek odstranit opláchnutím vodou.

Lze použít automatickou myčku s programem určeným pro mytí anesteziologických dýchacích přístrojů.

4.3. Dezinfekce a/nebo sterilizace

Zvolte dezinfekci teplem nebo chemickou metodou podle místních norem pro dezinfekci a podle tabulky použitelných metod.

Program tepelné dezinfekce

Automatické myčky určené pro mytí zdravotnického vybavení mají obvykle programové cykly pro tepelnou dezinfekci.

Dezinfekce varem

K dezinfekci použijte čistou vodu, zahřejte ji a vařte části masky po dobu 10 minut.

Chemická dezinfekce

Dodržujte pokyny výrobce chemického dezinfekčního prostředku ohledně ředění a doby působení. Po vystavení částí masky působení chemického dezinfekčního prostředku části důkladně opláchněte čistou vodou, abyste odstranili všechny zbytky chemikálie.

Autoklávování

Používejte standardní autoklávovací zařízení nastavené na max. teplotu 134 °C.

Pozor! Před autoklávováním odstraňte zátku z nafukovací trubice.

4.4 Sušení a chlazení

Před opětovným sestavením masky nechte její části zcela uschnout a/nebo vychladnout.

4.5 Kontrola částí masky

Po čištění, dezinfekci a/nebo sterilizaci pečlivě zkontrolujte všechny části masky, zda nejsou poškozené nebo nadměrně opotřebované. V případě potřeby je vyměňte. Některé metody čištění mohou způsobit změnu barvy pryžových dílů bez vlivu na jejich životnost. V případě poškození materiálu, např. popraskání, je třeba poškozené části masky vyměnit.

4.6 Sestavení masky

Masku znovu sestavte.

5. Specifikace

Hmotnost

Velikost 2: cca 40 g

Velikost 3: cca 62 g

Velikost 4: cca 67 g

Velikost 5: cca 78 g

Velikost 6: cca 92 g

Rozsah provozních teplot: -40 °C až 50 °C (40 °F až 122 °F)
Rozsah skladovacích teplot: -40 °C až 70 °C (40 °F až 158 °F)

Díly Materiály

Kupole masky: polysulfon nebo polykarbonát

Manžeta masky: silikonový kaučuk

Konektory masky: silikonový kaučuk

Háček: nerez

Informace k objednávce:

SM-86222 (STARÝ KÓD:PS-0126) Odolná silikonová polštářová maska č. 2: konektor ISO 22mm

SM-86232 (STARÝ KÓD:PS-0127) Odolná silikonová polštářová maska č. 3: konektor ISO 22mm

SM-86242 (STARÝ KÓD:PS-0128) Odolná silikonová polštářová maska č. 4: konektor ISO 22mm

SM-86252 (STARÝ KÓD:PS-0129) Odolná silikonová polštářová maska č. 5: konektor ISO 22mm

SM-86262 (STARÝ KÓD:PS-0130) Odolná silikonová polštářová maska č. 6: konektor ISO 22mm

SM-86221 (STARÝ KÓD:PN-0126) Silikonová polštářová maska č. 2: konektor ISO 22mm

SM-86231 (STARÝ KÓD:PN-0127) Silikonová polštářová maska č. 3: konektor ISO 22mm

SM-86241 (STARÝ KÓD:PN-0128) Silikonová polštářová maska č. 4: konektor ISO 22mm

SM-86251 (STARÝ KÓD:PN-0129) Silikonová polštářová maska č. 5: konektor ISO 22mm

SM-86261 (STARÝ KÓD:PN-0130) Silikonová polštářová maska č. 6: konektor ISO 22mm

PS: polysulfonový plast

PN: polykarbonátový plast

POZNÁMKA: Polykarbonát (PC) není dokonale odolný materiál. Životnost produktu se bude lišit v závislosti na různých metodách sterilizace.

Datum poslední revize: únor 2021

Verze: 2.0 (501-86221-00113)




Besmed Health Business Corp.

Address: No. 5, Lane 116, Wu-Kong 2nd Road,
Wu-Ku District, New Taipei City, Taiwan 24888,

E-mail: info@besmed.com,

URL: www.besmed.com

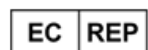

Mdi Europa GmbH

Address: Langenhagener Str. 71,
30855 Hannover-Langenhagen, Germany

Tel: +49 511 39089530, **Email:** info@mdi-europa.com

