



Abbott FreeGo® ovládání a funkce

SET DOSE (Nastavení dávky)

Dávka, která bude celkově aplikována. Pokud není specifikováno množství výživy, které má být aplikováno, nastavte dávku na možnost INF Dose (Neomezená dávka).

SET RATE (Nastavení rychlosti)

Nastavení objemu tekutiny aplikované za hodinu.

OFF/CHRG (Vypnutí/nabíjení)

Vypnutí pumpy (a nabíjení baterie pokud je pumpa zapojena).

RUN (Spuštění)

Spuštění pumpy a aplikace výživy.

HOLD (Pozastavení)


Pozastavení pumpy na dobu 5-ti minut. Použijte HOLD pokud chcete zrušit alarm nebo přerušit aplikaci výživy.

VOL FED (Aplikovaný objem)

Souhrnný objem výživy, který byl aplikován.

CLEAR VOL (Vymazání objemu)

Vymazání údaje o souhrnném objemu výživy, která byla aplikována a jejíž množství je uloženo v paměti pumpy.

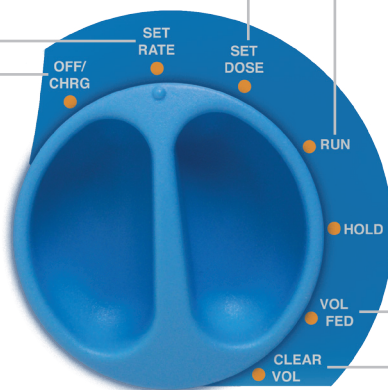

ŠIPKY NAHORU/DOLU

Stiskněte pro zvýšení nebo snížení dávky a rychlosti výživy nebo pro přepínání mezi různými nastaveními na LCD displeji.



TLAČÍTKO PLNĚNÍ

Stiskněte pro naplnění výživového setu.



TLAČÍTKO S MOŽNOSTMI NASTAVENÍ

Stiskněte ke změně hlasitosti zvukových alarmů a intenzity podsvícení.



Integrovaná baterie:

Když je pumpa síťově napájena, je obrázek zástrčky zobrazen na displeji a též svítí LED indikátor nad otočným ovladačem. Při nabíjení baterie "přebíhají" proužky v obrázku baterie na displeji. Plně nabitá baterie vydrží přibližně 24 hodin pokud dojde k výpadku proudu nebo je pumpa odpojena.

PLNÍČÍ poutko a tlačítko PLNĚNÍ:

Pumpa Abbott FreeGo® může být plněna buď manuálně nebo automaticky. Pro manuální plnění použijte fialové PLNÍČÍ poutko na kazetě výživového setu. Pro automatické plnění použijte tlačítko PLNĚNÍ.

Pro použití u lůžka a ambulantní použití:

Pumpa Abbott FreeGo® se používá se systémem Ready To Hang (RTH). Možnost ambulantního použití setu s vakem a Abbott FreeGo batohu.



Pokud budete mít jakékoliv dotazy týkající se nastavení nebo používání Pumpy Abbott FreeGo®, prosím volejte zástupce společnosti Abbott Nutrition - 602 652 266

Alarmy a varovné zprávy

OCCL (OKLUZE)

Pokud se zobrazí **OCCL INTO PUMP** a zazní zvukový alarm, nemůže být výživa aplikována z důvodu blokace mezi předplněnou lahví a pumpou.

Pokud se zobrazí **OCCL OUT OF PUMP** a zazní zvukový alarm, nemůže být výživa aplikována z důvodu blokace mezi pumpou a pacientem.

- Nastavte otočný ovladač do polohy HOLD.
- Sejměte výživový set z pumpy. Uvolněte překážku; zkontrolujte, zda není zalomená hadička nebo prázdná přeplněná láhev. Nasadte výživový set zpět.
- Jestliže se tento alarm objevil během plnění setu, pokuste se znovu naplnit výživový set a poté k sondě pro aplikaci enterální výživy připojte adaptér výživového setu.
- Nastavte otočný ovladač do polohy RUN a zahajte aplikaci výživy.

Kontrola, odpojte výživový set od sondy, vložte do vhodné nádoby a spusťte pumpu. Pokud výživa normálně proudí setem a nezazní žádný alarm, znamená to, že pumpa i výživový set jsou v pořádku. Je zde možnost, že je ucpaná sonda (kontaktujte zdravotnického pracovníka).



FEED EMPTY (VÝŽIVOVÝ SET JE PRÁZDNÝ)

Alarm FEED EMPTY se zobrazí pokud je detekován vzduch ve výživovém setu.

Jestliže je přeplněná láhev prázdná: Vyměňte předplněnou láhev pokud je potřeba.

Jestliže přeplněná láhev není prázdná:

- Nastavte otočný ovladač do polohy HOLD.
- Sejměte adaptér výživového setu od sondy pro aplikaci enterální výživy.
- Stiskněte a podržte tlačítko plnění.
- Jakmile tekutina dosáhne požadované hladiny, tlačítko plnění uvolněte.
- Bezpečně znovu napojte výživový set k sondě pro aplikaci enterální výživy.
- Nastavte otočný ovladač do polohy RUN a zahajte aplikaci výživy.



DOSE DONE (DÁVKA APLIKOVÁNA)

- **DOSE DONE** znamená, že naprogramovaná dávka výživy (SET DOSE) byla aplikována. To je v pořádku.
- Pokud chcete aby byla výživa aplikována dokud není předplněná láhev prázdná, nastavte na INF DOSE (otočte otočný ovladač na pozici SET DOSE, zmáčkněte tlačítko šipky dolů a podržte dokud se neobjeví na displeji INF DOSE).
- Pokud je dávka výživy nastavena na INF DOSE, tento alarm není aktivní.




LOW BATTERY (NÍZKÝ STAV BATERIE)

- **BATT LOW BATTERY** znamená, že baterie potřebuje dobít.
- Zbývá cca 30 minut chodu pumpy na baterii.
- Zapojte pumpu do síťového napětí a pokračujte v aplikaci výživy.
- Pokud se na displeji zobrazí CHRG PLEASE WAIT, znamená to, že je stav baterie pod akceptovatelným minimem. Počkejte dokud se na displeji nezobrazí PUMP READY TO USE.
- Plně nabitá baterie bude fungovat přibližně 24 hodin při 84ml/h. Baterie se nabíjí cca 6 hodin.



BATT EMPTY (VYBITÁ BATERIE)

- **BATT BATT EMPTY** znamená, že je baterie vybitá a aplikace výživy byla zastavena.
- Zapojte pumpu do sítě.
- Na displeji bude zobrazeno CHRG PLEASE WAIT dokud nebude pumpa schopná provozu.

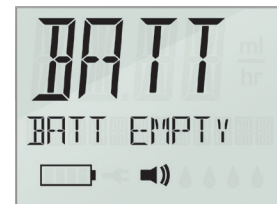

Vypnutí alarmu



HOLD

Otočte ovladač
na pozici HOLD
pro vypnutí
alarmu

Abbott Laboratories s.r.o.
Hadovka Office Park
Evropská 2591/33d
Praha 6
160 00