

Pumpa Abbott FreeGo®

Specifikace	
Rozměry	140mm V x 120mm Š x 80mm H
Hmotnost	490g
Průtoková rychlost	1–400ml/h (přírůstek 1ml)
Dávka	1–9999ml (přírůstek 1ml)
Rychlost plnění	≥700ml/h, Automatické plnění
Baterie	Typ: lithium-iontová. Výdrž nabití: ≥24 hodin při 84 ml/h. Doba nabíjení: ≤6 hodin.
Čištění	Omyvatelná pod tekoucí vodou.
Dezinfekce	10% roztok 5,25% chlornanu sodného (bělidlo pro domácnost) 40% roztok etylalkoholu 10% roztok kyseliny fosforečné

Pokud budete mít jakékoliv dotazy týkající se nastavení nebo používání pumpy Abbott FreeGo®, prosím volejte zástupce společnosti Abbott Nutrition - 602 652 266



Pumpa Abbott FreeGo®
zajišťuje výživu



Pumpa Abbott FreeGo®

Pumpa Abbott FreeGo® se snadno používá se systémem Ready to Hang (RTH)

Pumpa Abbott FreeGo® byla navržena tak, aby měla snadné ovládání pro pacienty, pečovatele, zdravotnické pracovníky v nemocničních zařízeních i domácí péči

Pumpa Abbott FreeGo® je přenosná a tudíž umožňuje pohyb v okolí nemocnice a napomáhá ambulantním pacientům se lépe začlenit do společnosti

Pumpa Abbott FreeGo® je preferována jak pacienty tak pečovateli



Snadné ovládání

Velký intuitivní otočný ovladač, ideální pro pacienty s omezenou obratností



Funkce paměti

Program paměti umožňuje uchovávání dat

Snadná manipulace

Výživový set lze do pumpy vložit pouze jednou rukou. Jednoduché ovládání pro pacienty s artritidou i zdravotně postižené pacienty.




Snadná údržba

Lze snadno očistit hadříkem nebo pod tekoucí vodou

Navrženo pro snadné používání v nemocničních zařízeních a domácí péči

FreeGo®

Freedom for life

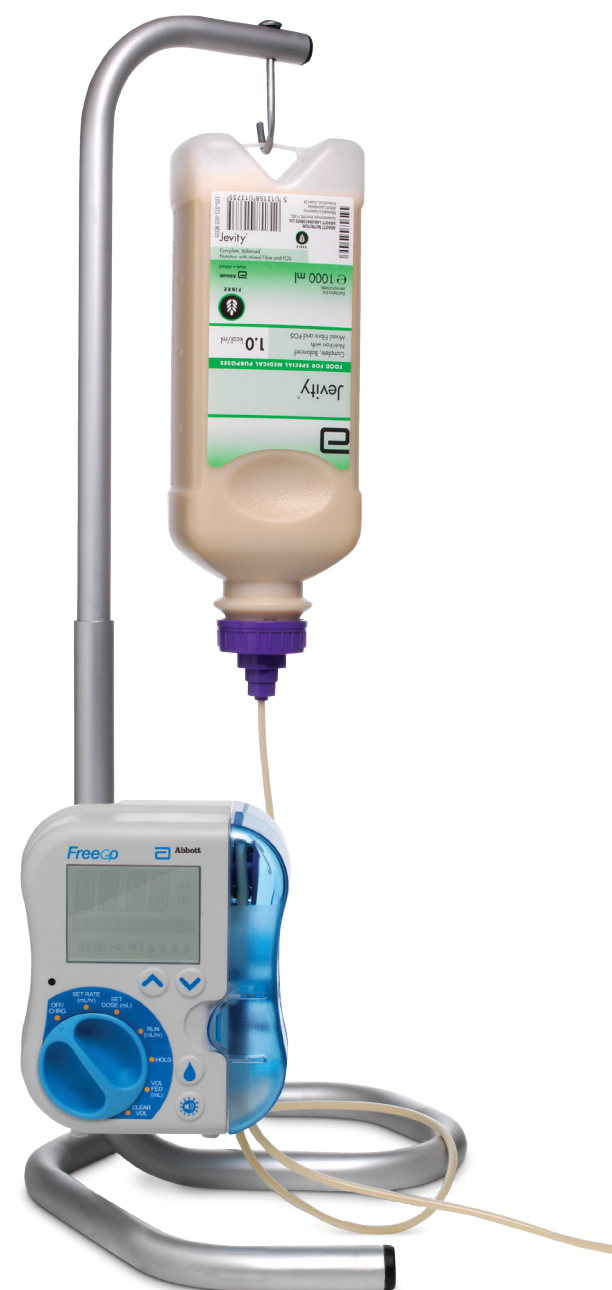

Přehlednost

Velký snadno čitelný LCD displej

Snadné plnění

Pohodlná funkce automatického plnění



Přesnost

Přesnost* +/- 5% splňuje potřeby Vašich pacientů, i ty citlivých na objem výživy

Bezpečnost

Jedinečná bezpečnostní funkce AccuSafe zabraňuje volnému průtoku výživy a udržuje přesnost podávané výživy



Jistota

Zvukový alarm a LCD displej upozorňují na změnu funkce

* Viz Návod k použití, instrukce k testování přesnosti pumpy