

Měření, kterým můžete věřit

Pulsní oxymetry OXY-O Plus MEDITECH



Malé rozměry a snadné přenášení

Barevný OLED monitor, 6 různých režimů zobrazení

Histogram pulsu a 4 druhy zobrazení křivky SpO2

Snadné použití, vysoká přesnost a opakování

Zobrazení alarmu vybití baterií

Index perfúze (PI) pulsního oxymetru

Automatické vypnutí po 20 s bez signálu

Napájení pomocí běžných AAA baterií a nepřetržitý provoz po dobu 30 hodin

Nízká hmotnost 55 g s bateriemi

Nastavení varovných alarmů: (SpO2 nízký/vysoký) (Puls nízký/vysoký)

Obrazovka 1

Nastavení signálů: Přejít na další menu

SpO2 Alm Hi: Nast. vys. úrovní podílu kyslíku

SpO2 Alm Lo: Nast. níž. úrovní podílu kyslíku

PR Alm Hi: Nast. vys. úrovní tepové frekvence

PR Alm Lo: Nast. níž. úrovní tepové frekvence

+/-: Volba vyšších nebo nižších hodnot

Exit: Opuštění menu

Obrazovka 2

Alm: Zapnutí a vypnutí alarmů

Beep: Zapnutí a vypnutí alarmu tepové frekvence

Restore: Resetování na tovární nastavení

Exit: Opuštění menu

/ meditechgroup

www.meditech.com.cn

