



# DEZINFEKCE A ČIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÝCH NÁSTROJŮ

## DENTASEPT Tri-Enzymatic

### DEZINFEKCE A ČIŠTĚNÍ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ VE STOMATOLOGII

- Složení tří enzymů: Proteáza / Lipáza / Amyláza
- Neobsahuje soli
- 1 litr poskytne 200 litrů pracovního roztoku
- Účinný od 7 minut
- Účinný proti obaleným virům
- Vhodný pro ultrazvukové lázně
- Po zředění má neutrální pH, kompatibilní s širokou škálou materiálů



# DENTASEPT Tri-Enzymatic

Dezinfekce a čištění zdravotnických prostředků ve stomatologii

## CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

- pH koncentrovaného roztoku: cca 8,5
- pH zředěného roztoku v 1% (pitná voda): 7,3
- pH zředěného roztoku v 1% (měkká voda): 7,6


## NÁVOD K POUŽITÍ

Koncentrovaný roztok. Před použitím 5 l kanystru: nejprve našroubujte pumpu.



Určeno pro dezinfekci ponorem a pro použití v ultrazvukových lázních. Dodržujte čas expozice pro zvolenou koncentraci roztoku.

Roztok vyměňte, jakmile je viditelně znečištěný, nejméně však jednou denně, aby byla zachována účinnost přípravku.

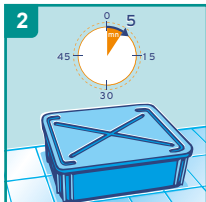

Nástroje zcela ponořte do pracovního roztoku, zakryjte víkem a nechte působit.



Viditelné nečistoty očistěte kartáčkem.



Pro odstranění veškerých stop přípravku a organických nečistot důkladně opláchněte ošetřené zdravotnické prostředky pitnou vodou.

## TABULKA DÁVKOVÁNÍ

| MNOŽSTVÍ ROZTOKU | KONCENTRACE APLIKAČNÍHO ROZTOKU |
|------------------|---------------------------------|
|                  | 0,5%                            |
| 1 litr           | 5 ml                            |
| 2 litry          | 10 ml                           |
| 5 litrů          | 25 ml                           |
| 10 litrů         | 50 ml                           |

## MIKROBIOLOGICKÉ VLASTNOSTI

| ÚČINNOST                                        | KONCENTRACE | DOBA EXPOZICE |
|-------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Baktericidní* - podle EN 13727/EN 14561         | 0,5%        | 5 min         |
| Proti kvasinkám* - podle EN 13624/EN 14562      | 0,5%        | 5 min         |
| Proti obaleným virům* - podle EN 14476/EN 17111 | 0,5%        | 7 min         |

\*nečisté podmínky

## INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ

| PRODUKT                 | BALENÍ                                 | OBJEDNACÍ KÓD |
|-------------------------|----------------------------------------|---------------|
| Dentasept Tri-Enzymatic | 12 x 1 l lahev                         | 3127260       |
| Dentasept Tri-Enzymatic | 1 x 5 l kanystr s pumpou (dávka 10 ml) | 3127780       |

### Prvky označení

#### Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Výstražné symboly :  
nebezpečnosti

Signální slovo : Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti : H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.  
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení : **Prevention:**  
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.  
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/ obličejový štít.

#### Opatření:

P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMACNÍ STŘEDISKO/lékaře.

#### Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:

Poly(oxy-1,2-ethandiyl),.alfa.-[2-dicethylmethylammonio)ethyl]-.omega.-hydroxy-propanoát alkoholy, C8-10, ethoxylované



## OBLAST POUŽITÍ

Dezinfekční a čistící prostředek pro stomatologické instrumentárium před sterilizací.

## NÁVOD K POUŽITÍ

Koncentrovaný roztok. Před použitím 5 l kanystru: nejprve našroubujte pumpu.

- Určeno pro dezinfekci ponorem a pro použití v ultrazvukových lázních. Dodržujte čas expozice pro zvolenou koncentraci roztoku.
- Nástroje zcela ponořte do pracovního roztoku, zakryjte víkem a nechte působit.
- Viditelné nečistoty očistěte kartáčkem.
- Pro odstranění veškerých stop přípravku a organických nečistot důkladně opláchněte ošetřené zdravotnické prostředky pitnou vodou.

Roztok vyměňte, jakmile je viditelně znečištěný, nejméně však jednou denně, aby byla zachována účinnost přípravku.

## SLOŽENÍ

Kvartérní propionát amonný, Chlorhexidin diglukonát, neiontové povrchově aktivní látky, enzymatický komplex (proteáza, lipáza a amyláza), parfém, barvivo, pomocné látky.

## SKLADOVÁNÍ

Nebezpečí. Respektujte informace pro používání (vytvořené v souladu s evropskými pravidly pro klasifikaci a označování chemických směsí). Skladování: +5°C až +25°C.

## CERTIFIKÁTY

Zdravotnický prostředek. Plná antimikrobiální účinnost přípravku Dentasept Tri-Enzymatic je zahrnuta ve vědecké dokumentaci, která je k dispozici na vyžádání.

## POUŽÍVEJTE ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK BEZPEČNĚ

Přečtěte si etiketu a informace o výrobku.



POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.



D.M.D.  
1, Rue de l'Espoir  
59260 Lezennes  
France

ECOLAB GESELLSCHAFT MBH  
Odštepny závod  
Vocťárova 2449/5  
Praha 8, 180 00  
Česká republika

Distributor pro ČR:  
ECOLAB GESELLSCHAFT MBH  
Rivergate D1/4OG  
Handelskai 92  
1200 Wien  
Austria



www.anios.com