



## 2 V 1 - DEZINFEKČNÍ A ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK

### Aniosept Activ

#### VYŠŠÍ STUPEŇ DEZINFEKCE I ČISTÍCÍ DEZINFEKCE PRO ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY VČETNĚ FLEXIBILNÍCH ENDOSKOPŮ

- Produkt ve formě mikrogranulátu 2 v 1 - čistící dezinfekce a vyšší stupeň dezinfekce
- Široké antimikrobiální spektrum za 15 minut (sporicidní při 2%)
- Neobsahuje sloučeniny bóru
- Možnost kontroly ředění pomocí testovacích proužků



# Aniosept Activ


Vyšší stupeň dezinfekce zdravotnických prostředků

## CHARAKTERISTIKA PRODUKTU


- Produkt ve formě mikrogranulátu na bázi kyseliny peroctové
- Bílý prášek s jemnou granulací (mikrogranulát)
- Hygroskopický prášek (skladujte na suchém místě)
- Dbejte na řádné opětovné uzavírání obalu
- Mírně parfemovaný
- pH zředěného produktu (1%): cca 8.5

## NÁVOD K POUŽITÍ


### A - Dezinfekce a čištění

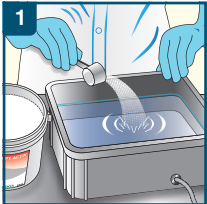

**Rozpusťte** 25, 50 nebo 100 g v 5 l vody podle požadované koncentrace.

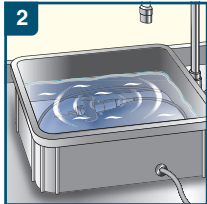

**Uplně** ponořte zdravotnický prostředek (doba kontaktu: podle požadavku na účinnost). Očistěte kartáčem a naplňte roztokem a následně vyčistěte i pracovní kanály a duté části.

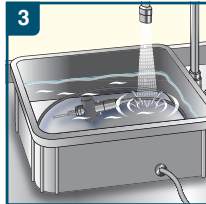


**Důkladně** opláchněte zdravotnický prostředek vodou z vodovodu (odpovídající mikrobiologická kvalita). Pro endoskopické vybavení: vnější a vnitřní části.


**Termolabilní nástroje a přístroje:** Přejděte k následujícímu kroku (viz postup dle interních pravidel)

**Sterilizovatelné nástroje a přístroje:** Důkladně osušte a přejděte k následujícímu kroku (viz postup dle interních pravidel).


### B - Vyšší stupeň dezinfekce

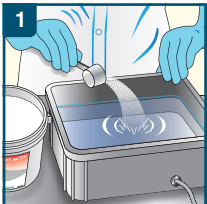


**Rozpusťte** 25, 50 nebo 100 g v 5 l vody (1)

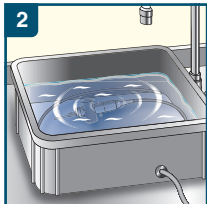

**Zcela** ponořte předem dezinfikovaný a očištěný zdravotnický prostředek. Naplňte roztokem i vnitřní kanály.

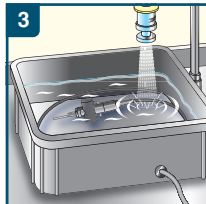

**Důkladně** opláchněte sterilizovanou nebo upravenou, případně kontrolovanou pitnou vodou.

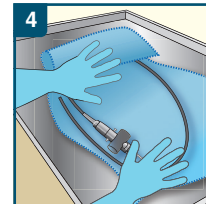

**Osušte** zdravotnický prostředek sterilizovaným ručníkem a skladujte asepticky.

(1) Před namáčením přístrojů a nástrojů zkontrolujte ředění roztoku testovacím proužkem. Jedna dávkovací lžičce = 25 g

## MIKROBIOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Výsledky popsané v následující tabulce byly získány při testování ve špinavém prostředí - dezinfekční a čistící roztok

ÚČINNOST	KONCENTRACE	ČAS EXPOZICE
Účinnost proti bakteriím a kvasinkám	0.5%	5 min
	1.0%	5 min
	2.0%	-
Baktericidní, fungicidní, virucidní, tuberkulocidní	0.5%	60 min
	1.0%	30 min
	2.0%	15 min
Účinnost proti virům: Enterovirus Polio	0.5%	30 min
	1.0%	15 min
	2.0%	15 min
Adenovirus	0.5%	15 min
Norovirus	0.5%	15 min

Signální slovo:  
NEBEZPEČÍ

Identifikátory výrobku:

EC 239-707-6 PERUHLIČITAN SODNÝ  
EC 287-089-1 SLOUCENINY IONTU KVARTERNÍHO AMONIA, BENZYLALKYL C12-14 DIMETHYLU, CHLORIDY

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.  
H318 Způsobuje vážné poškození očí.  
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  
Pokyny pro bezpečné zacházení - Všeobecné:  
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.



LABORATOIRES ANIOS  
1, Rue de l'Espoir  
59260 Lezennes  
France

Distributor pro ČR:

ECOLAB s.r.o.  
Vocetářova 2449/5, Libeň  
180 00 Praha 8  
Česká republika

## OBLAST POUŽITÍ

Čistící a vysoce dezinfekční prostředek na nástroje a endoskopy a termolabilní nástroje a přístroje.

## SLOŽENÍ

Produkt ve formě mikrogranulátu na bázi peruhličitanu sodného, tetraacetylethylendiaminu a N-alkyl (C12-14) -N-benzyl-N, N-dimethylamoniumchloridu. Po smíchání s vodou okamžitě vzniká kyselina peroctová.

## SKLADOVÁNÍ

Nebezpečí. Dbejte uživatelských pokynů (vypracovaných v souladu s evropskými pravidly týkajícími se klasifikace a označování chemických přípravků). Skladujte při teplotách +5°C až +30°C. SKLADOVATELNOST: 3 roky. Zdravotnický prostředek třídy IIb (podle Nařízení 93/42/EEC)

## CERTIFIKACE

Veškeré antimikrobiální působení produktu je popsáno ve vědecké dokumentaci.



POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Výsledky uvedené v následující tabulce odpovídají testům v čistých podmínkách: vyšší stupeň dezinfekce

ÚČINNOST	KONCENTRACE	ČAS EXPOZICE
Vyšší stupeň dezinfekce baktericidní, fungicidní, virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, sporicidní	0.5%	90 min
	1.0%	60 min
	2.0%	15 min

## INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ

PRODUKT	BALENÍ	OBJEDNACÍ KÓD
Aniosept Activ	4 x 1 kg kbelík	3101390
Aniosept Activ	2 x 5 kg kbelík	3101370

Pokyny pro bezpečné zacházení - Prevence:

P260 Nevdechujte prach.  
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.  
P280 Noste ochranné rukavice a ochrannou pomůcku na oči/obličej.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Reakce:

P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: omyjte velkým množstvím vody.  
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Odstraňování:

P501 Nepoužitý produkt i s nádobou zlikvidujte jako nebezpečný odpad.

