



## VÝHODY

- Desinfekce rotačních dentálních nástrojů
- Baktericidní, kvasinkocidní a virucidní účinnost



Formule douce



## APLIKACE

Desinfekční prostředek připravený k použití, určený k čištění a desinfekci všech typů dentálních rotačních nástrojů, vrtaček, zdravotnických prostředků.  
Zdravotnický prostředek. TŘÍDA IIB.

## NÁVOD K POUŽITÍ

BACTINYL® FRAISES se používá čistě k čištění a desinfekci vrtaček a rotačních a kanálových nástrojů.  
BACTINYL® FRAISES se používá namáčením.  
Po použití nástroj co nejdříve úplně ponořte.  
Nechte působit 15 minut. Opláchněte. Vysušte.

## FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Vzhled:	kapalina
Barva:	bezbarvý
Vůně:	bez vůně
Hustota:	= 1
pH prostředku:	10 +/- 1
Trvanlivost:	2 roky
Skladování:	4°C - 35°C



## MIKROBIOLOGICKÉ VLASTNOSTI

**Baktericidní účinnost:** EN 13727 (podmínky špíny – 5 min – 20° C), EN 14561 (podmínky špíny – 5 min – 20°C),

**Kvasinkocidní účinnost:** EN 13624 (podmínky špíny – 5 min – 20°C), EN 14562 (podmínky špíny – 15 min – 20°C),

**Virucidní účinnost:** EN 14476 na PRV\*, BVDV\*, H1N1, Herpès, Vaccinia virus, Rotavirus (podmínky špíny – 5 min – 20°C), Norovirus (podmínky špíny - 15 min- 20°C), HIV (podmínky špíny – 60 sec – 20°C)

\* Swine Pseudorabies Virus (PRV) a Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) jsou substituty pro HBV a HCV.

## BALENÍ

Kanystř 5L

Ref. LB920470

## BEZPEČNOST

Prostředek určený výhradně k profesionálnímu použití.  
Pro více informací konzultujte bezpečnostní list.