



VÝHODY

- Bezpečný i pro ty nejkřehčí povrchy
- Baktericidní, kvasinkocidní, sporicidní a virucidní účinnost
- Styk s potravinami



Formule douce



APLIKACE

Kontaktní čištění a desinfekce neinvazivních zdravotnických prostředků, lékařských přístrojů, vybavení a zařízení. TŘÍDA IIA.

NÁVOD K POUŽITÍ

Rovnoměrně nastříkejte BACTINYL SPRAY MOUSSANT INODORE na plochy určené k čištění a desinfekci. Pěna se rychle rozplyne pro snadné osušení. Nechte uschnout. Neoplachujte, kromě případu styku s plochami, které mohou přijít do styku s potravinami. Nenahrazuje desinfekci namáčením. V souladu s nařízením ze dne 19/12/13 pozměňujícím nařízení ze dne 08/09/99, týkajícím se prostředků pro čištění vybavení a předmětů určených ke styku s potravinami.

FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Vzhled:	kapalina
Barva:	bezbarvá
Vůně:	bez vůně
Hustota:	= 1
pH prostředku:	slabá zásada
Trvanlivost:	2 roky
Skladování:	4°C – 35°C

MIKROBIOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Baktericidní účinnost: EN 13727 (podmínky špíny – 1 min – 20°C), EN 14561 (podmínky špíny – 5 min – 20°C), EN 16615 (podmínky špíny – 2 min +/- 15 sec – 20°C)

Kvasinkocidní účinnost: EN 13624 (podmínky špíny – 1 min – 20°C), EN 14562 (podmínky špíny – 15 min – 20°C), EN 16615 (podmínky špíny – 2 min +/- 15 s – 20°C)

Sporicidní účinnost: EN 13704 na Bacillus Subtilis a Clostridium difficile (podmínky čistoty – 60 min – 20°C)

Virucidní účinnost: EN 14476 kompletně na Norovirus, Poliovirus a Adenovirus (podmínky špíny – 15 min – 20°C); Coronavirus a Papillomavirus (podmínky špíny – 15 min – 20°C), PRV*, BVDV* a H1N1 (podmínky špíny – 5 min – 20°C), Herpès, Vaccinia virus a Rotavirus (podmínky špíny – 5 min – 20°C), HIV (podmínky špíny – 60 s – 20°C)

* Swine Pseudorabies Virus (PRV) a Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) jsou substituty pro HBV (Hepatitis B) a HCV (Hepatitis C).

BALENÍ

Rozprašovač 750ml

Ref. LB920880

BEZPEČNOST

Prostředek určený výhradně k profesionálnímu použití. Pro více informací konzultujte bezpečnostní list.