

DEZINFEKCE A ČIŠTĚNÍ NÁSTROJŮ

DENTASEPT 3H Rapid

DEZINFEKCE A ČIŠTĚNÍ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ VE STOMATOLOGII

- Z jednoho 1 l přípravku je 50 l pracovního roztoku
- Účinný od 5 minut - účinnost proti obaleným virům
- Lze použít v ultrasonických lázních
- pH zředěného roztoku ve 2%: 7
- Nekorozivní, široká materiálová kompatibilita



DENTASEPT 3H Rapid

Dezinfekce a čištění zdravotnických prostředků ve stomatologii


CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

- pH neředěného roztoku: min. 6,5 - max. 7,5
- pH zředěného roztoku v pitné vodě ve 2%: 7,3
- pH zředěného roztoku v měkké vodě ve 2%: 7,4

NÁVOD K POUŽITÍ



Koncentrovaný roztok. Před použitím nejprve našroubujte pumpu. Určeno pro dezinfekci ponorem a pro použití v ultrazvukových lázních. Dodržujte dobu expozice pro vybranou koncentraci, minimálně 5 minut.

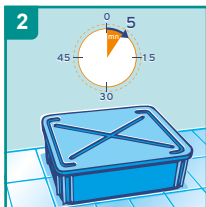

Nástroje zcela ponořte do pracovního roztoku, zakryjte víkem a nechte působit.



Viditelné nečistoty očistěte kartáčkem.



Pro odstranění veškerých stop přípravku a organických nečistot důkladně opláchněte ošetřené zdravotnické prostředky pitnou vodou.

Roztok vyměňte, jakmile je viditelně znečištěný, nejméně však jednou denně, aby byla zachována účinnost přípravku.

TABULKA DÁVKOVÁNÍ

MNOŽSTVÍ ROZTOKU	KONCENTRACE APLIKAČNÍHO ROZTOKU		
	0,50%	1,00%	2,00%
1 litr	5 ml	10 ml	20 ml
2 litry	10 ml	20 ml	40 ml
4 litry	20 ml	40 ml	80 ml
8 litrů	40 ml	80 ml	160 ml

MIKROBIOLOGICKÉ VLASTNOSTI

ÚČINNOST	KONCENTRACE	DOBA EXPOZICE
Baktericidní* podle EN 13727/EN 14561	0,5%	5 min
Proti kvasinkám* podle EN 13624/EN 14562	2,0%	5 min
Tuberkulocidní* podle EN 14348/EN 14563	2,0%	60 min
Proti obaleným virům* podle EN 14476/EN 17111	1,0%	5 min

*nečisté podmínky

INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ

PRODUKT	BALENÍ	OBJEDNACÍ KÓD
Dentasept 3H Rapid	3 x 1 l lahev	3127140
Dentasept 3H Rapid	1 x 5 l s 20 ml pumpou	3127640

Prvky označení

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Výstražné symboly :

Signální slovo : Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti :

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení :

Prevence:

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/ obličejový štít.

Opatření:

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:

alkoholy, C8-10, ethoxylované

alkyl(C8-C18)(benzyl)dimethylamonium-chlorid



OBLAST POUŽITÍ

Dezinfekční a čistící prostředek pro stomatologické instrumentarium před sterilizací.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Koncentrovaný roztok. Před použitím nejprve našroubujte pumpu. Určeno pro dezinfekci ponorem a pro použití v ultrazvukových lázních. Dodržujte dobu expozice pro vybranou koncentraci, minimálně 5 minut.
- Nástroje zcela ponořte do pracovního roztoku, zakryjte víkem a nechte působit.
- Viditelné nečistoty očistěte kartáčkem.
- Pro odstranění veškerých stop přípravku a organických nečistot důkladně opláchněte ošetřené zdravotnické prostředky pitnou vodou.

Roztok vyměňte, jakmile je viditelně znečištěný, nejméně však jednou denně, aby byla zachována účinnost přípravku.

SLOŽENÍ

Didecylldimethylamonium chlorid, chlorhexidin diglukonát, neiontové povrchově aktivní látky, parfém, barvivo, pomocné látky.

SKLADOVÁNÍ

Nebezpečí. Respektujte informace pro používání (vytvořené v souladu s evropskými pravidly pro klasifikaci a označování chemických směsí). Skladování: +5°C až +25°C.

CERTIFIKÁTY

Zdravotnický prostředek. Plná antimikrobiální účinnost přípravku Dentasept 3H Rapid je zahrnuta ve vědecké dokumentaci, která je k dispozici na vyžádání.

POUŽÍVEJTE ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK BEZPEČNĚ

Přečtěte si etiketu a informace o výrobku.



POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.



D.M.D.
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

ECOLAB GESELLSCHAFT MBH
Odštěpný závod
Vocářova 2449/5
Praha 8, 180 00
Česká republika

Distributor pro ČR:
ECOLAB GESELLSCHAFT MBH
Rivergate D1/4OG
Handelskai 92
1200 Wien
Austria



www.anios.com