

DEZINFEKCE A ČIŠTĚNÍ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ VE STOMATOLOGII

DENTASEPT® SH PRO

ŘEŠENÍ V DEZINFEKCI

Dentasept SH Pro je dezinfekční a čisticí prostředek k přímému použití pro zdravotnické prostředky ve stomatologii.

Kombinuje široké spektrum účinnosti s krátkou dobou expozice, má vynikající materiálovou kompatibilitu a jemné vlastnosti.

Dentasept SH Pro je vhodný pro různé zdravotnické prostředky. V praxi lze používat podle interních směrnic zdravotnického zařízení, dodává výsledky potřebné k omezení šíření patogenů.

- Vhodné i pro materiály citlivé na alkohol
- Dobré pěnicí vlastnosti
- Účinné složení bez zbytečných přísad (bez parfémů a barviv)
- Dezinfekce a čištění v jednom kroku, zanechává vše viditelně čisté



DENTASEPT® SH PRO

Dezinfekční prostředek, určený k dezinfekci a čištění neinvazivních stomatologických zdravotnických prostředků, které nelze dezinfikovat ponorem

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU


- Dezinfikuje a čistí v jednom kroku
- Bez obsahu alkoholu, parfemace a barviv
- Široké spektrum účinnosti a optimální doba působení
- Kompaktní pěnový dávkovač omezuje tvorbu aerosolů a těkavých složek (lahev s rozprašovačem 750 ml)
- Kompatibilita se širokou škálou materiálů, včetně polymerů (např. polykarbonát, plexisklo)
- Hustá pěna s dobrou přilnavostí (lahev s rozprašovačem 750 ml)
- pH 6

NÁVOD K POUŽITÍ

Přípravek k přímému použití.




Nastříkejte přípravek na netkanou textilii a otřete povrch.

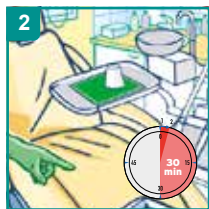

Respektujte uvedenou dobu expozice pro požadovanou účinnost.



Oplach je nutný, pouze pokud dochází ke kontaktu s pokožkou či se sliznicemi.

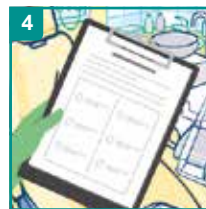

Informace o čištění a dezinfekci zdravotnických prostředků naleznete v pokynech výrobce. Frekvenci použití a čištění aplikačních pomůcek řiďte provozním řádem zařízení.

MIKROBIOLOGICKÉ VLASTNOSTI

PODMÍNKY	DOBA EXPOZICE
Baktericidní* podle EN 16615 (2 min), EN 13727 (1 min)	2 min
Účinnost proti kvasinkám* podle EN 13624, EN 16615	2 min
Tuberkulocidní* podle EN 14348	60 min
Účinnost proti obaleným virům* podle EN 14476	1 min
Účinnost proti Polyomaviru SV 40* podle EN 14476	5 min
Účinnost proti Rotaviru* podle EN 14476	30 s
Omezeně virucidní účinnost* podle EN 14476	30 min
Adenovirus	30 min
Norovirus (MNV)	15 min

* nečisté podmínky

INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ

PRODUKT	BALENÍ	OBJEDNACÍ KÓD
Dentasept SH Pro	12 x 750 ml sprej - lahev	3126960
Dentasept SH Pro	1 x 5 l kanystř	3127540



D.M.D.
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

ECOLAB GESELLSCHAFT MBH
Odštěpný závod
Vocťářova 2449/5
Praha 8, 180 00
Česká republika

Distributor pro ČR:
ECOLAB GESELLSCHAFT MBH
Rivergate D1/4OG
Handelskai 92
1200 Wien
Austria



www.anios.com

OBLAST POUŽITÍ

Dezinfekční a čisticí přípravek ve stomatologii:

- Mezi dvěma pacienty: dezinfekce a čištění neinvazivních zdravotnických prostředků, které nelze dezinfikovat ponorem.
- Před krokem čištění, dezinfekce a sterilizace zdravotnických prostředků (například rotačních násadců, turbín, kolének) a v souladu s použitím doporučeným výrobcem: zabalte a/ nebo otřete v případě transportu do sterilizační místnosti.

NÁVOD K POUŽITÍ

K přímému použití

- 1) Nastříkejte přípravek na netkanou textilii a otřete povrch.
- 2) Respektujte uvedenou dobu expozice pro požadovanou účinnost.
- 3) Oplach je nutný, pouze pokud dochází ke kontaktu s pokožkou či se sliznicemi.
- 4) Informace o čištění a dezinfekci zdravotnických prostředků naleznete v pokynech výrobce. Frekvenci použití a čištění aplikačních pomůcek řiďte provozním řádem zařízení.

SLOŽENÍ

Didecyldimethylamonium chlorid, pomocné látky.

CERTIFIKÁTY

Zdravotnický prostředek. Plná antimikrobiální účinnost přípravku Dentasept SH Pro je zahrnuta ve vědecké dokumentaci, která je k dispozici na vyžádání.

SKLADOVÁNÍ

Skladování: +5°C až +25°C.

POUŽÍVEJTE ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK BEZPEČNĚ

Přečtěte si etiketu a informace o výrobku.



POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.